

Control de la glucosa en la sangre con TRUE METRIX

Guía para su prueba de glucosa en la sangre

Pasos simples para su prueba de glucosa en la sangre

Medidor, tiras de prueba y componentes del sistema



Pruebas de glucosa en la sangre

- 

1 Lávese las manos con agua tibia y jabonosa.
- 

2 Retire la tira de prueba del envase y ciérrelo de inmediato. Inserte el extremo con los contactos de la tira de prueba (los bloques hacia arriba) en el puerto de prueba. El medidor se activa.
- 

3 Puncie la yema del dedo. Para uso de un solo paciente.
- 

4 Con la tira de prueba todavía en el medidor, toque la parte superior de la gota de sangre con la punta para la muestra y deje que la gota penetre en la tira de prueba. Retire la tira de la gota de sangre inmediatamente después de que el medidor emita un pitido y aparezcan guiones en la pantalla del medidor.
- 

5 En tan solo 4 segundos, se mostrará el resultado de la glucosa.
- 

6 Sujete el medidor con la tira de prueba orientada hacia abajo. Presione el botón de liberación de la tira para desechar la tira de prueba en el recipiente apropiado.

Esta guía describe brevemente cómo se realiza la prueba de glucosa en la sangre. Si necesita información sobre cómo configurar el medidor con la fecha y hora correctas, consulte la sección "Cómo empezar" del Manual de usuario. Si necesita información más detallada sobre el procedimiento completo de la prueba de glucosa en la sangre, consulte la sección "Pruebas de sangre" en el Manual de usuario.