

# Control de la glucosa en la sangre con **TRUE METRIX GO**

Guía para realizar la prueba de glucosa en la sangre

## Pasos simples para realizar la prueba de glucosa en la sangre

#### Medidor, tiras de prueba y componentes del sistema



\*Intentar recargar la batería o enchufar el medidor a un adaptador o una toma eléctrica podría causar un incendio del medidor o una explosión de la batería. \*\*Puerto USB solo para descarga de datos. NO LO USE para cargar la batería o el medidor.

Punta para la muestra

### Pruebas de glucosa en la sangre



Lávese las manos con agua tibia y jabonosa.



Retire la tira de prueba del envase y ciérrelo de inmediato. Inserte el extremo con los contactos de la tira de prueba (los bloques hacia arriba) en el puerto de prueba. El medidor se activa.



En tan solo 4 segundos, se mostrará el resultado de la glucosa. Deseche la tira de prueba en un recipiente apropiado.



Punce la yema del dedo. Para uso de un solo paciente.



#### Cambio de la batería



Dé vuelta el medidor hasta que la etiqueta del medidor quede hacia arriba. Busque el símbolo de la bandeja de la batería = en la etiqueta del médidor y tire de la bandeja de la batería hasta que esta quede expuesta. Cambie la batería. \*El medidor usa una batería no recargable CR2032

gota penetre en la tira de prueba. Retire la tira de la gota de sangre inmediatamente después de que aparezcan guiones en la pantalla del medidor.

Con la tira de prueba todavía en el medidor,

toque la parte superior de la gota de sangre

con la punta para la muestra y deje que la

© 2019 Trividia Health, Inc. • RF4LAT08 Rev. 51

Esta guía describe brevemente cómo se realiza la prueba de glucosa en la sangre. Si necesita información sobre cómo configurar el medidor con la fecha y hora correctas, consulte la sección "Cómo empezar" del Manual del usuario. Si necesita información más detallada sobre el procedimiento completo de la prueba de glucosa en la sangre, consulte la sección "Pruebas de sangre" en el Manual del usuario.

TRIVIDIA HEALTH, INC.

2400 N.W. 55TH COURT FORT LAUDERDALE, FL 33309 U.S.A.



